

Algicell® Alginat Silberwundverband

Anwendungshinweise

- Wunde sollte bei jedem Verbandwechsel mit Standardmethoden gereinigt werden.
- Die Wundauflage sollte in passender Größe verwendet werden.
- Um die Wundauflage abzudecken, verwenden Sie einen geeigneten Sekundärverband.
- Die Wundauflage kann bis zu 5 Tagen verbleiben. Wenn der Sekundärverband seine Aufnahmekapazität erreicht hat die Wundauflage erneuern.
- Bei trockenem Wundbett die Wundauflage vor der Abnahme mit steriler Kochsalzlösung befeuchten.
- Die Wundauflage behutsam vom Wundbett entfernen.
- Bevor Sie eine neue Wundauflage aufbringen, reinigen Sie das Wundbett.

Verordnungs- und erstattungsfähig

Algicell Alginat Silberwundverbandmittel sind CE-zertifizierte, sterile Medizinprodukte zur Wundbehandlung.

Algicell® Alginatverband
ist in allen Apotheken
und im medizinischen
Fachhandel erhältlich.

Weiterführende Informationen zur
Wundheilung und zur Optimierung des
Wundheilungsprozesses finden Sie unter

www.algicell.de

Algicell® Generalvertrieb
in Deutschland:

ApoFit

ApoFit Arzneimittelvertrieb GmbH
Jäckstr. 29
96052 Bamberg
Tel.: 0951/510 760 0
Fax: 0951/510 760 29
E-Mail: info@apofit-gmbh.de
Internet: www.apofit-gmbh.de

Stand: 01.10.2016

ApoFit

DER SPEZIALIST
FÜR WUNDHEILUNG!



Algicell® Alginat Silberwundverband
Die antibakterielle Kraft von Silber!



Die Lösung für akute und chronische
sowie infizierte Wunden.

ApoFit

ApoFit Arzneimittelvertrieb GmbH
www.apofit-gmbh.de

DAS PROBLEM:

chronische und schlecht heilende Wunden!

DIE LÖSUNG:

Wundbehandlung mit
Algicell® Alginat Silberwundverband

Warum Algicell® Alginat Silberwundverband?

- Effektivität von bis zu 7 Tagen: Der Verband mit 1,4% Silber bietet eine kontinuierliche und anhaltende antibakterielle Aktivität von bis zu 7 Tagen, die innerhalb kürzester Zeit zu wirken beginnt.
- Starke Absorption: Durch die hohe Kapazität der Exsudataufnahme von bis zu 24,65 g pro 100 g der Wundflüssigkeit wird überschüssiges und schädliches Exsudat beseitigt, so dass die Wunde schneller heilen kann und das Risiko der Mazeration vermindert wird.
- Bildung eines Gels zur Förderung der Wundheilung: Der Algicell® Alginat Silberwundverband kombiniert die Eigenschaften der Alginsäure, die starke Gelierung und die hohe Wasserfestigkeit. Das Exsudat wird als Gel gebunden, womit die Wundhygiene vor allem bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden verbessert wird. Die Wunde kann schneller abheilen.
- Einfacher und atraumatischer Verbandwechsel: Der Verband lässt sich einfach von der Wunde lösen. Der Verbandwechsel ist leicht und angenehm. Die Wundheilung wird nicht durch die Beschädigung von Gewebestrukturen gefährdet.

Indikationen

- Mäßig bis stark exsudierende Wunden
- Diabetisches Fußsyndrom
- Fuß- / Beinulzera
- Druckgeschwüre / Wunden (Teil- und Vollhaut)
- Spalthautentnahme bzw. Transplantationen
- Traumatische Wunden
- Operationswunden

Wundheilungsprozess

Algicell® Alginat Silberwundverband ist eine primäre Wundaufgabe aus Kalzium-Alginat mit 1,4 % Silber. Bei Vorhandensein von Wundexsudat nehmen die Natriumionen aus dem Exsudat den Platz der Silberionen ein und geben die Silberionen frei. Sobald das Wundexsudat absorbiert ist, bildet das Alginat ein Gel, das dazu beiträgt, eine feuchte Umgebung für eine optimale Wundheilung beizubehalten. Die freigegebenen Silberionen stellen eine wirksame Barriere dar und schützen den Verband vor bakterieller Besiedlung.



Algicell® Alginat Silberwundverband



PZN	PRODUKTNAME	PACKUNG
07618080	Algicell Ag Alginat Verband mit Silber 5x5cm	10 Stück
07618097	Algicell Ag Alginat Verband mit Silber 10x10cm	10 Stück
07618111	Algicell Ag Alginat Verband mit Silber 10x20cm	5 Stück
07618128	Algicell Ag Alginat Verband mit Silber 20x30cm	5 Stück
07618074	Algicell Ag Alginat Verband mit Silber 2x30cm	5 Stück

Algicell® Alginat Silberwundverband
bietet Ihren Patienten eine
gewinnbringende Kombination aus:
lang anhaltender antibakterieller Aktivität
hoher Absorption und
hochgradiger Kosteneffektivität!